

# Instrukcja użycia

opatrunku **WOUNDCLOT** do hemodializy podczas usuwania igieł z przetoki lub graftu (sztucznej przetoki)



**LOCKPHARMA**  
way to health

1. Przygotować opatrunek **WOUNDCLOT**, składając go do wymiarów 2,5 x 2,5 cm (dwa złożenia).
2. Usunąć plaster mocujący igłę do przetoki.




fot. 1

3. Umieścić opatrunek **WOUNDCLOT** w miejscu wkłucia, dwukrotnie złożyć gazę o wymiarach 10 x 10 cm, aby uzyskać wymiary 5 x 5 cm i umieścić ją na opatrunku.
4. Usunąć igłę.
5. Ucisnąć delikatnie miejsce wkłucia.  
**Podczas uciskania nie należy znacząco przesuwać gazy.**
6. Jeśli na gazie pojawi się krew, nie należy nic z tym robić. Opatrunek **WOUNDCLOT** jest najbardziej skuteczny w połączeniu z krwią pacjenta.
7. Pierwsza kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy krwawienie ustało, jest zalecana po 3 minutach. Jeśli krwawienie utrzymuje się, należy odczekać kolejne 3 minuty do następnej kontroli.

Po ustaniu intensywnego krwawienia gazę znajdującą się na opatrunku **WOUNDCLOT** należy przykleić plasterem, pozostawiając na czas wyjmowania drugiej igły (fot. 2).



fot. 2

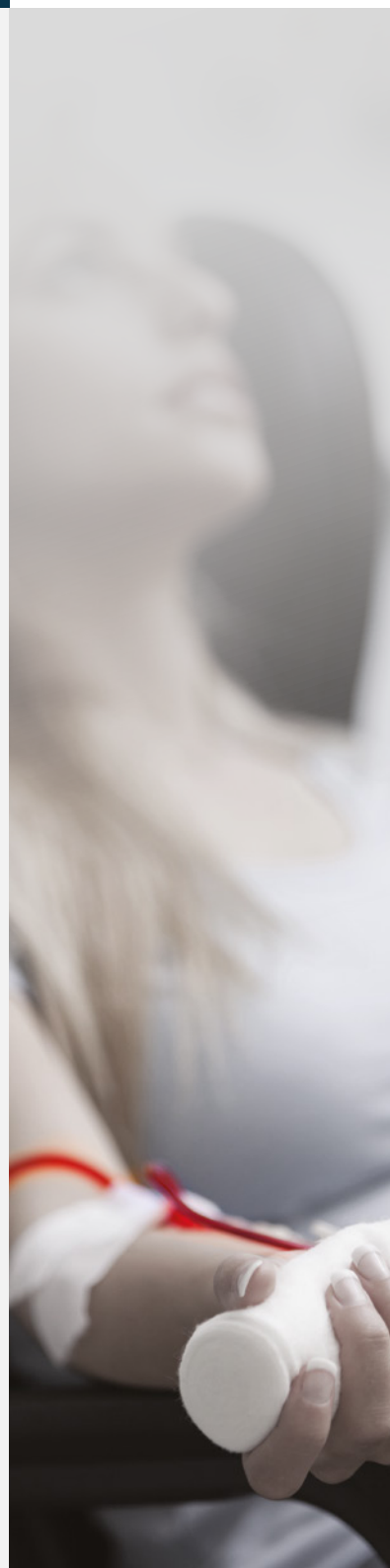

# WOUNDCLOT – jedyny taki opatrunek

- Następnie przeprowadzić ten sam proces dla drugiej igły (od punktu 1 do 7).
- Po przylepieniu plastru opatrunku z gazą w miejscu wkłucia drugiej igły (po ustaniu intensywnego krwawienia), pierwsza gaza i opatrunek **WOUNDCLOT** mogą zostać usunięte (fot. 3).



fot. 3


- Zabezpieczyć miejsce wkłucia, po usunięciu opatrunku, plasterm zgodnie z lokalnym protokołem (fot. 4).



fot. 4

- Ostateczne usunięcie plastra, zgodnie z lokalnym protokołem lub nawykami pacjenta.

UWAGA: Podczas stosowania opatrunku należy przestrzegać zasad higieny zgodnie z lokalnym protokołem szpitala.

**WOUNDCLOT** jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Nr artykułu: 38060102.  0483

Dystrybutor